



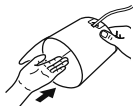
## CM2 Stredná manžeta

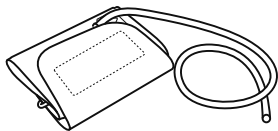


-  Pred uvedením zariadenia do činnosti si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu. Návod si odložte pre prípad potreby v budúcnosti.

### Návod na použitie

1.



2.

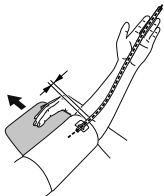

### Návod na použitie pre strednú manžetu

Ďakujeme, že ste si zakúpili strednú manžetu OMRON. Priemer ruky pre túto manžetu je 22 až 32 centimetrov. Stredná manžeta OMRON sa môže pripojiť k rôznym meračom tlaku krvi OMRON. Pozrite si, prosím, originálny návod na použitie k vášmu meraču krvného tlaku.

Na svojom aktuálnom produkte si overte, ktorú koncovku je potrebné použiť. Pozor, koncovky sú si navzájom veľmi podobné. Dbajte, aby ste k vzduchovej hadičke pripojili správnu koncovku. Použitie nesprávnej koncovky môže spôsobiť unikanie vzduchu a nesprávne meranie.


#### Aplikovanie manžety na ruku

1. ľavú ruku prestrčte cez manžetu.

**Poznámka:** Ak nie je manžeta poskladaná, prestrčte koniec manžety, najvzdialenejší od hadičky, cez kovovú obruč tvaru D, aby sa vytvorila slučka. Hladká strana tkaniny by mala byť vo vnútri slučky manžety.

2. Správne umiestnite ruku.

- 1) Vzduchová hadička by mala prechádzať dole dovnútra predlaktia a byť v jednej línii s vaším prostredným prstom.
- 2) Spodná časť manžety by mala byť približne 1 až 2 cm nad vaším lakťom.
- 3) Aplikujte manžetu na svoju pažu, aby farebná značka (modrá šípka pod hadičkou) bola vycentrovaná v strede vnútornej časti vašej ruky a mierila dole do vnútra ruky.

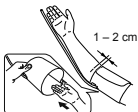

## Rady

## Údržba

### Meranie na pravej ruke

Aplikujte manžetu, aby vzduchová hadička bola na strane vášho lakťa.

- Budte opatrní, aby ste nepoložili ruku na vzduchovú hadičku, alebo inak nezabránili prietoku vzduchu do manžety.
- Manžeta by mala byť 1 až 2 cm nad lakťom.

3. Keď je manžeta umiestnená správne, PEVNE uzavrite suchý zips.


- Nedávajte manžetu cez hrubé oblečenie a nevyhŕňajte si rukáv, ak je príliš tesný.
- Vyrovnajte manžetu do jednej výšky so srdcom (do výšky hrude). Ak je to potrebné, použite vankúš alebo podušku.
- Flaky na manžete sa dajú dobre odstrániť pomocou vlhkej handričky a mydlovej vody.

### **Neperte manžetu ani ju nenamáčajte!**

- Neskladajte manžetu alebo vzduchovú hadičku spolu príliš tesno a nekrčte ich.
- Manžetu nechovávajte a neskladujte v nasledujúcich podmienkach:
  - v mokrom stave,
  - na miestach vystavených extrémnym teplotám, vlhkosti, priamemu slnku, prachu alebo výparom spôsobujúcim koróziu,
  - na miestach vystavených vibráciám, úderom, nárazom alebo na naklonených podkladoch.



Táto manžeta spĺňa ustanovenia smernice EC 93/42/EEC (smernica pre zdravotnícke zariadenia).

<b>Výrobca</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-002, JAPONSKO		
<b>EU-zastúpenie</b> <table border="1" data-bbox="64 806 236 879"><tr><td>EC</td><td>REP</td></tr></table>	EC	REP	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDSKO <a href="http://www.omron-healthcare.com">www.omron-healthcare.com</a>
EC	REP		
<b>Výrobná prevádzka</b>	<b>OMRON DALIAN CO., LTD.</b> Dalian, ČÍNA		
<b>Pobočka</b>	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, VEĽKÁ BRITÁNIA		
	<b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NEMECKO		
	<b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCÚZSKO		
<b>Dovoz, distribúcia a servis v SR</b>	<b>CELIMED s.r.o.</b> Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA <a href="http://www.celimed.sk">www.celimed.sk</a>		

Vyrobené v Číne

Tento produkt OMRON sa vyrába v rámci prísneho systému kontroly kvality japonskej spoločnosti OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan.