



# OMRON

## Malá manžeta CS2 (HEM-CS24)

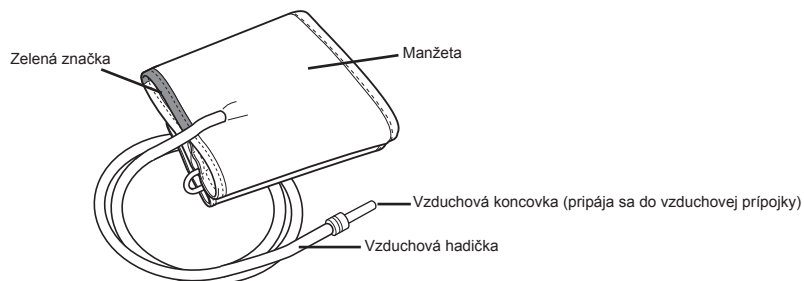

 Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.

### Návod na používanie

#### Návod na používanie malej manžety

Ďakujeme vám, že ste si kúpili malú manžetu k meračom krvného tlaku OMRON. Manžeta je určená na ramená s obvodom od 17 do 22 centimetrov. Malú manžetu OMRON možno pripojiť k rôznym typom meračov krvného tlaku OMRON. Riadte sa pokynmi návodu, ktorý prináleží k vášmu meraču krvného tlaku.

Na svojom aktuálnom produkte si overte, ktorú koncovku je potrebné použiť. Pozor, koncovky sú si navzájom veľmi podobné. Dbajte, aby ste k vzduchovej hadičke pripojili správnu koncovku. Použitie nesprávnej koncovky môže spôsobiť unikanie vzduchu a nesprávne meranie.


#### Nasadenie manžety

1. Ľavú ruku si zasuňte do „tunela“ manžety.

**Poznámka:** Keď nie je manžeta zložená, pretiahnite koniec najviac vzdialený od hadičky cez kovový prstenec tvaru D tak, aby sa vytvoril tunel. Hladká látka má byť na vnútornej strane tunela manžety.

2. Správne si napolohujte ruku a rameno.

- 1) Vzduchová hadička sa má vinúť po vnútornej strane predlaktia v osi prostredníka.
- 2) Spodná časť manžety má byť približne 1 až 2 cm nad lakťom.
- 3) Nasadte manžetu na rameno tak, aby bola značka (šípka pod hadičkou) v strede vnútornej časti hornej končatiny a smerovala nadol po vnútornej strane.

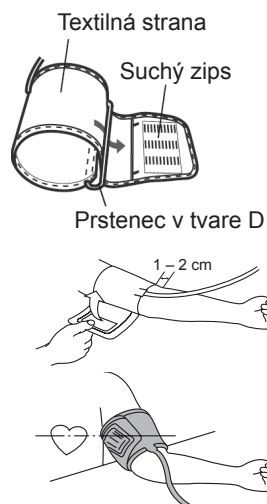

#### Meranie na pravej ruke

Manžetu nasadte tak, aby bola vzduchová hadička pri lakti.

- Dávajte pozor, aby ste si nepoložili ruku na vzduchovú hadičku alebo inak neobmedzili prúdenie vzduchu manžetou.
- Manžeta má byť 1 až 2 cm nad lakťom.

3. Keď manžetu správne nasadíte, DÔKLADNE zaistite suchý zips.

### Rady

- Manžetu nenasadzujte na hrubé oblečenie a ak sú rukávy pritesné, nerolujte ich nahor.
- Manžetu nasadte do úrovne srdca (vo výške prs). Ak je potrebné, použite podhlavník alebo inú podložku.



### Údržba

- Znečistenie môžete z manžety opatrne odstrániť handričkou navlhčenou v saponátovej vode.  
**Manžetu nenamáčajte, nevlhčite, neperte ani neumývajte!**

- Manžetu a vzduchovú hadičku neskladajte spolu príliš natesno ani ich nezalamujte.
- Manžetu neodkladajte za nasledujúcich okolností:
  - ak je vlhká,
  - na miesta s extrémnymi teplotami, vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, prachom alebo výparmi spôsobujúcimi koróziu,
  - na miesta vystavené vibráciám, nárazom a na šikmých plochách.

CE

Táto manžeta spĺňa podmienky smernice 93/42/EHS (o zdravotníckych pomôckach).

<b>Výrobca</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE Co., Ltd.</b> 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
<b>Zastúpenie v EÚ</b> 	<b>OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V.</b> Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDBSKO www.omron-healthcare.com
<b>Výrobná prevádzka</b>	<b>OMRON DALIAN Co., Ltd.</b> No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, Čína
<b>Dcérske spoločnosti</b>	<b>OMRON HEALTHCARE UK LTD.</b> Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.co.uk <b>OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH</b> Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NEMECKO www.omron-healthcare.de <b>OMRON SANTÉ FRANCE SAS</b> 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCÚZSKO www.omron-healthcare.fr
<b>Dovoz, distribúcia a servis v SR</b>	<b>CELIMED s.r.o.</b> Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA www.celimed.sk

Tento produkt OMRON sa vyrába v rámci prísneho systému kontroly kvality japonskej spoločnosti OMRON Healthcare Co. Ltd., Japan.

Vyrobené v Číne  
IM-HEM-CS24-E-04-07/2014