

Manžeta Easy Cuff HEM-RML31 (HEM-RML31-E)


• *Návod na používanie*


2 SK

Manžeta Easy Cuff HEM-RML31 (HEM-RML31-E)





Ďakujeme vám, že ste si kúpili manžetu Easy Cuff HEM-RML31 k meračom krvného tlaku OMRON. Táto manžeta je vhodná na použitie na ramenách s obvodom 22 až 42 cm. Pozrite si pôvodný návod na používanie merača krvného tlaku.

 **Pred použitím tohto zariadenia si dôkladne prečítajte tento návod na používanie. Odložte si ho pre prípad potreby v budúcnosti.**

 **Upozornenie:** Indikuje potenciálne rizikové situácie, ktoré (ak sa im nevyhnete) by mohli mať za následok menšie alebo stredne závažné zranenie používateľa alebo pacienta, prípadne poškodenie zariadenia alebo iného majetku.

- Túto manžetu používajte výhradne len so schváleným meračom krvného tlaku OMRON.
- Použite rovnakú ramennú manžetu ako je uvedené naboku výrobku, vedľa vzduchového konektora. Nepoužívajte iné druhy ramenných manžiet.
- Manžetu neperte ani nenamáčajte.


Návod na používanie

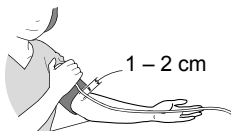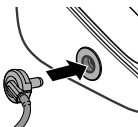

Z ľavého ramena si vyzlečte tesné oblečenie alebo uvoľnite tesný vyhrnutý rukáv. Manžetu nenasadzujte na hrubý odev.

1. Zasuňte vzduchovú zástrčku do vzduchového konektora.
2. Manžetu pevne nasadte na ľavé rameno.

Spodný okraj manžety musí byť 1 až 2 cm nad lakťom. Vzduchová hadička sa nachádza na vnútornej strane hornej končatiny a je zarovnaná s vašim prostredníkom.

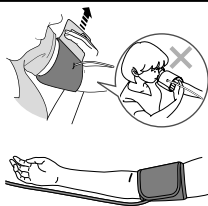

3. Manžetu upevnite pomocou suchého zipsu.

Meranie na pravej ruke

Vzduchová hadička vedie pozdĺž lakt'a. Dbajte na to, aby ste ruku nemali položenú na vzduchovej hadičke.

Poznámka: Tlak krvi meraný na ľavej a pravej ruke sa môže líšiť, a preto môžu byť aj namerané údaje odlišné. Spoločnosť OMRON odporúča vždy vykonávať merania na tej istej strane. Ak sa namerané údaje na oboch rukách zásadne líšia, požiadajte svojho lekára o informáciu, na ktorej ruke si máte merať svoj krvný tlak.

- Ramennú manžetu čistite mäkkou a suchou handričkou alebo mäkkou a navlhčenou handričkou a saponátom.
- Na čistenie manžety nepoužívajte benzín, riedidlá ani podobné prípravky.
- Manžetu nekladte na miesta s extrémnymi teplotami, vlhkosťou, priamym slnečným svetlom, prachom alebo výparmi spôsobujúcimi koróziu.
- Vzduchovú hadičku nadmerne neohýbajte ani nezalamujte.



Údržba



Táto manžeta spĺňa požiadavky európskej smernice 93/42/ES (Smernica o zdravotníckych pomôckach), ako aj požiadavky normy EN1060 Neinvazívne tonometre, Časť 1: Všeobecné požiadavky a Časť 3: Špecifické požiadavky na elektromechanické systémy na meranie tlaku krvi.

Tento produkt OMRON sa vyrába podľa prísneho systému kvality spoločnosti OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., JAPONSKO.

Opis produktu	Manžeta k meraču krvného tlaku
Model	Manžeta Easy Cuff HEM-RML31 (HEM-RML31-E)
Obvod ramena	22 – 42 cm
Rozsah merania	Tlak: 0 až 299 mmHg Pulz: 40 až 180 úderov/min.
Presnosť	Tlak: ± 3 mmHg Pulz: ± 5 % hodnoty na displeji
Životnosť	1 rok

Výrobca 	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, k unotsubo, Terado-cho, Muko, kyoto, 617-0002 JAPONSKO
Zastúpenie v EÚ 	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, HOLANDESKO www.omron-healthcare.com
Výrobná prevádzka	OMRON DALIAN Co., Ltd. Dalian, ČÍNA
Dcérska spoločnosť	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton keynes, Mk 15 0DG, U.K. OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NEMECKO www.omron-healthcare.de OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex FRANCUZSKO www.omron-healthcare.fr
Dovoz, distribúcia a servis v SR	CELIMED s.r.o. Pri majeri 22, 831 06 Bratislava, SLOVENSKÁ REPUBLIKA www.celimed.sk